


1. Kullanım amacı

Turnike manşonunun kullanım amacı uzuvlarda gerçekleştirilen cerrahi müdahaleler esnasında hemostaz elde etmek için kan dolaşımını engellemektir.

2. Manşon tanımı

- Manşonun görünüşü

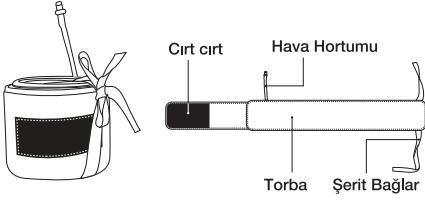


- Manşonun özellikleri

- Elastik torba derin dokulara baskı uygulanmasını sağladığı için torba düşük basınç uygulayarak kolayca şişirilebilmektedir. (Lütfen hastanelerde kullanılan genel basınç değerlerine bakın. Normal azami basınç yetişkinlerde kol için 300 mmHg, yetişkinlerde bacak için 400 mmHg, çocuklarda kol için 200 mmHg ve çocuklarda bacak için 300 mmHg'dir. Basınç ayarı hastanın yaş, cinsiyet, kilo, ölçü, vb. göre ayarlanabilir.)
- Tüm manşonlar yüksek kalite kontrol standartları kapsamında 800 mmHg basınçta test edilmiştir.


3. Manşonun kullanımı

- Manşonu kullanmadan önce dikkat edilecekler

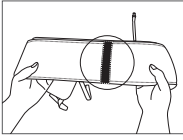

Cırt cırtlı kısmın sabitleme kayışına iyice oturduğundan emin olun.



Cırt cırtın torbaya bağlı olduğundan emin olun.

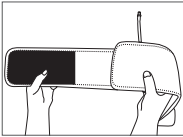


Cırt cırtın manşon yayıldığında manşonun iç kısmına geçebileceğinden emin olun.

- Manşonun takılması

- Manşon her hastanın durumuna ve kontraendikasyon, komplikasyon, enfeksiyon ve sınırlayıcı hasarlar gibi değerlendirmelere göre seçilmelidir.
- Çalıştırma süresinin 1 saatten daha uzun olduğu durumlarda ikili manşon önerilebilir. Bu durumlarda damar, cilt ve sinir hasarını en düşük seviyede tutmak için bu manşonların kullanılması düşünülmelidir.
- Hastanın manşonun takılacağı alandaki distal ve proksimal manşon kenarları arasındaki fark büyükse koni manşon kullanılmalıdır.

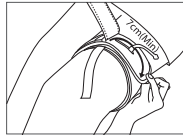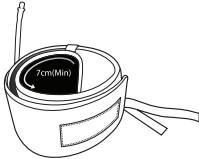


- Manşon hemostaz gereken vücut kısmına sarıldığında en azından 7 cm (3 inç) üst üste gelmelidir.
- Manşonun genişliği kişiye göre belirlenmeli ve uzvun çapının yarısından daha geniş olmalıdır.
- Manşon damar, sinir ve cilt hasarını en düşük seviyede tutabilmek için mümkün olan en kaslı ve proksimal olarak en geniş olan vücut kısmına (kalp yakınlarında) yerleştirilmelidir.
- Manşonu bir uzuv etrafında sardığınızda manşon hortumunu (tüpünü) yukarıya dönüş konumlandırın.

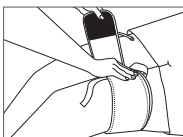


Manşon kısmını şerit ile başlangıç noktası olarak uzvun ortasında bağlayın ve manşonun içine yalnızca iki parmak girebilene kadar sıkın.


* Deri ile manşon arasında bir boşluk olması durumunda kan geçişi gerçekleşebilir.

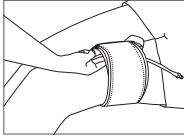DTS-3000**- MaŖonu taktıktan sonra dikkat edilmesi gerekenler**


MaŖonu taktıktan sonra cilt ile torba arasına iki parmađınızı sokabildiđinizden emin olun.

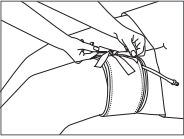

MaŖon ŖiŖirilirken katlanmayacak veya yerinden çıkmayacak Ŗekilde Ŗeritler ile sabitlenmelidir.

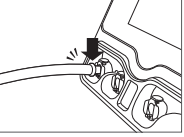- Cihaz ile maŖonun bađlanması

Hortum uçlarını cihazdaki yuvasına bađlayın ve bir tık sesi duyana kadar bastırın.

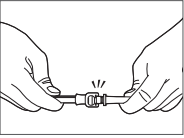

Cihaz hava yuvası, maŖon hortumu ve hava hortumu için belirtilen renklerin aynı olup olmadıđına bakın.

4. Kullandıktan sonra temizlik**- Genel maŖon**

- MaŖonu temizlemeden önce torbadaki tüm havayı boşaltın.
- KumaŖ ile torbanın sterilizasyon veya temizlik için birbirinden ayrılması gerekmez.
- MaŖonu benzin, tiner veya alkol ile silmeyin.
- MaŖonu çamaŖır makinesinde 60°C sıcaklıkta yıkayabilirsiniz, fakat elektronik kurutma makinesinde kurutmayın.
- MaŖon tamamen kurumazsa dayanıklılıđını kaybedebilir veya maŖon aŖınabilir.
- MaŖonu temizledikten sonra asarak kurutun.

- Kauçuk torbalı maŖon

- MaŖonu temizlemeden önce torbadaki tüm havayı boşaltın.
- Sık sık yüksek basınçlı buharlı sterilizasyon yapılması maŖonun eskimesini hızlandırır.
- MaŖonların sterilizasyon sonrasında tekrar kullanılabilmesi kapsamlı bir hazırlık gerektirir. Bu da kullanılan temizlik ve dezenfeksiyon maddelerinin maŖonları otoklavlamadan önce saf su ile iyice durulanarak ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir.
- MaŖon tamamen temizlendiđinde kumaŖ kısım ile i torba yayıldıktan sonra az sabunlu su ile fıralanmasını ve ılık su ile durulanmasını öneririz.

5. MaŖon teknik özelliklerini

Para no.	Torba ölçüsü	Ŗekil	Önerilen ölçü
DTC-S02	40 X 7 cm	TEKLİ	< 33cm (13")
DTC-S04	52 X 7.5 cm	TEKLİ	< 45cm (17.7")
DTC-S05	61 X 9 cm	TEKLİ	< 54cm (21")
DTC-S06	80 X 9 cm	TEKLİ	< 73cm (28.7")
DTC-S07	86 X 10 cm	TEKLİ	< 79cm (31.1")
DTC-S08	107 X 10 cm	TEKLİ	< 100cm (39.4")
DTC-D04	57 X 10 cm	İFTLİ	< 50cm (19.7")
DTC-D07	57 X 15 cm	İFTLİ	< 50cm (19.7")
DTC-D05	80 X 15 cm	İFTLİ	< 73cm (28.7")
DTC-D06	107 X 15 cm	İFTLİ	< 100cm (39.4")
DTC-C25	70 X 10 cm	KONİK TEKLİ	< 63cm (24.8")
DTC-C26	90 X 12 cm	KONİK TEKLİ	< 83cm (32.7")
DTC-C27	107 X 14 cm	KONİK TEKLİ	< 100cm (39.4")
DTC-CD25	70 X 10 cm	KONİK TEKLİ	< 63cm (24.8")
DTC-CD26	90 X 12 cm	KONİK TEKLİ	< 83cm (32.7")
DTC-CD27	107 X 14 cm	KONİK TEKLİ	< 100cm (39.4")

Para no.	Torba ölçüsü	Silikon torba	Önerilen ölçü
DTC-SA01	30 X 11 cm	TEKLİ	< 23cm (9.1")
DTC-SA02	46 X 11 cm	TEKLİ	< 39cm (15.4")
DTC-SA05	61 X 11 cm	TEKLİ	< 54cm (21.3")
DTC-SA06	76 X 11 cm	TEKLİ	< 69cm (27.2")
DTC-SA07	86 X 11 cm	TEKLİ	< 79cm (35")